

HB8888-01**HB8889-01**

Scie à plâtre avec système d'aspiration HFS intégré

1	Explications des symboles	25
2	Contenu de la livraison	26
2.1	Contenu de la livraison pour l'ensemble complet	26
2.2	Contenu de la livraison pour le kit de modernisation	26
3	Consignes de sécurité	27
4	Application	27
4.1	Utilisation conforme à l'usage prévu	27
4.2	Contre-indications	27
5	Montage	28
5.1	Montage de la cloche d'aspiration	28
5.2	Montage de la lame de scie	28
6 7	Nettoyage et entretien	29
8 9	Accessoires / pièces de rechange	30
10	Accessoires / En option	30
11	Garantie	31
	Directives relatives à la protection de l'environnement	31
	Adresse du service technique et du fabricant	32



A VOTRE SERVICE DEPUIS 1995



**Scie à plâtre avec système d'aspiration HFS intégré,
destinée à la découpe et au retrait de plâtres
orthopédiques, avec captation des poussières à la
source**

1 Explications des symbols

Sym bol	Defin ition
	Marquage CE
	Attention
	Fabricant
	Désignation du lot
	Numéro de commande
	Dispositif médical / Dispositif sur ordonnance FDA
	Dispositif médical
	Non stériles
	Marquage WEEE
 /  Hinweis auf eIFU	(Électronique) mode d'emploi

2 Contenu de la livraison

2.1 Contenu de la livraison pour l'ensemble complet

HB 8881 HB	Aspirateur HFS
8887-14 HB	Filtre en laine polaire ECO
8886-05 HB	Sac filtrant en laine polaire (1 pièce)
8882-02 HB	Tuyau flexible complet
8884 HB	Scie complète TITANIUM II
8896-03	lame de scie
	ventouse
	instrument
	mode d'emploi

2.2 Contenu de la livraison pour le kit de modernisation

HB 8881 HB	Aspirateur HFS
8887-14 HB	Filtre en laine polaire ECO
8886-05 HB	Sac filtrant en laine polaire (1 pièce)
8882-02	Tuyau flexible complet
	ventouse
	instrument
	mode d'emploi

*Sur demande de nos clients, nous modifions cet équipement standard.
Veuillez noter le texte sur votre facture.
Vous trouverez de plus amples informations dans le chapitre Accessoires.*

3 Consignes de sécurité

Nos produits sont exclusivement destinés à un usage professionnel conforme à leur destination par du personnel spécialisé formé et qualifié, et ne peuvent être achetés que par ce dernier

Toutes les consignes de sécurité de ce mode d'emploi sont marquées d'un  symbole.



Avant toute utilisation, lisez ce mode d'emploi ainsi que les réglementations nationales en vigueur en matière de santé et de sécurité et agissez en conséquence.
Conservez ce mode d'emploi pour une utilisation ultérieure et joignez-le à l'appareil, même s'il est transmis ou vendu.



Utilisation conforme à l'usage prévu : Cet appareil est conçu pour l'extraction de sciure fine et sèche..



N'enlevez jamais le filtre lorsque vous passez l'aspirateur.



Ne rivetez ou ne vissez pas d'étiquettes ou d'enseignes sur l'appareil. Cela peut rendre l'isolation protectrice inefficace. Des étiquettes adhésives sont recommandées.



N'utilisez que des fiches et des câbles en bon état. Vérifiez régulièrement les câbles et les prises.



La tension secteur et la tension indiquée sur l'appareil doivent correspondre.



N'utilisez que des accessoires d'origine HFS.



Evitez que se produisent des dommages pendant le stockage, la manipulation et le nettoyage.



L'appareil ne doit pas être utilisé dans des zones présentant un risque d'explosion.



Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif devrait faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

4 Application

L'équipement d'extraction de poussière est utilisé en orthopédie pour enlever la poussière de gypse.

4.1 Utilisation conforme à l'usage prévu

Ensemble d'appareils utilisés pour extraire de la zone de travail la poussière produite par une scie à gypse pendant l'enlèvement du gypse (p. ex., une scie à gypse pneumatique ou électrique). Il se compose habituellement d'une pompe à vide motorisée, d'un filtre et d'un contenant collecteur (p. ex., sac ou cartouche). Il s'agit généralement d'une unité mobile dont le moteur peut tourner en même temps que le moteur de la scie.


4.2 Contre-indications

Il n'y a pas des contre-indications connues.

5 Montage


5.1 Montage de la cloche d'aspiration

- Poussez la Pos. 1 sur la Pos. 3 et vissez avec la Pos. 2.
- Poser la Pos. 5 (bague d'étanchéité) sur la Pos. 4 et graisser la fermeture à baïonnette.
- Relier la Pos. 1 à la Pos. 4 par l'intermédiaire de la fermeture à baïonnette.

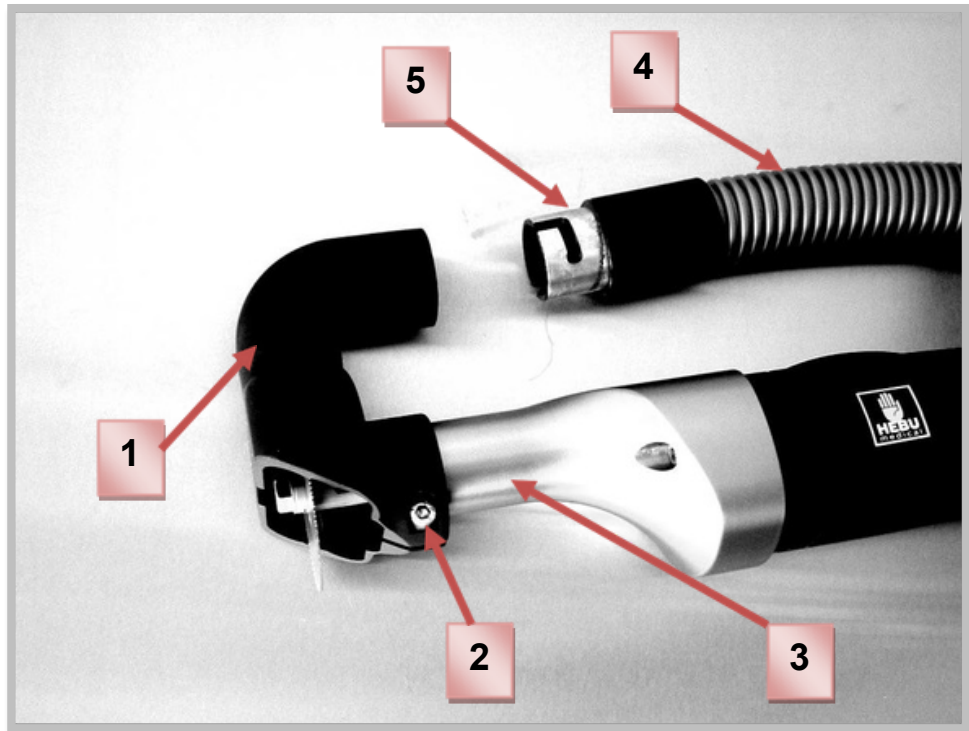

5.2 Montage de la lame de scie

- Mettre la lame de scie en place et la serrer légèrement à la main avec la vis.
- Placez la clé à fourche sur l'arbre pour le bloquer.
- Serrez la vis à l'aide d'une clé à douille.

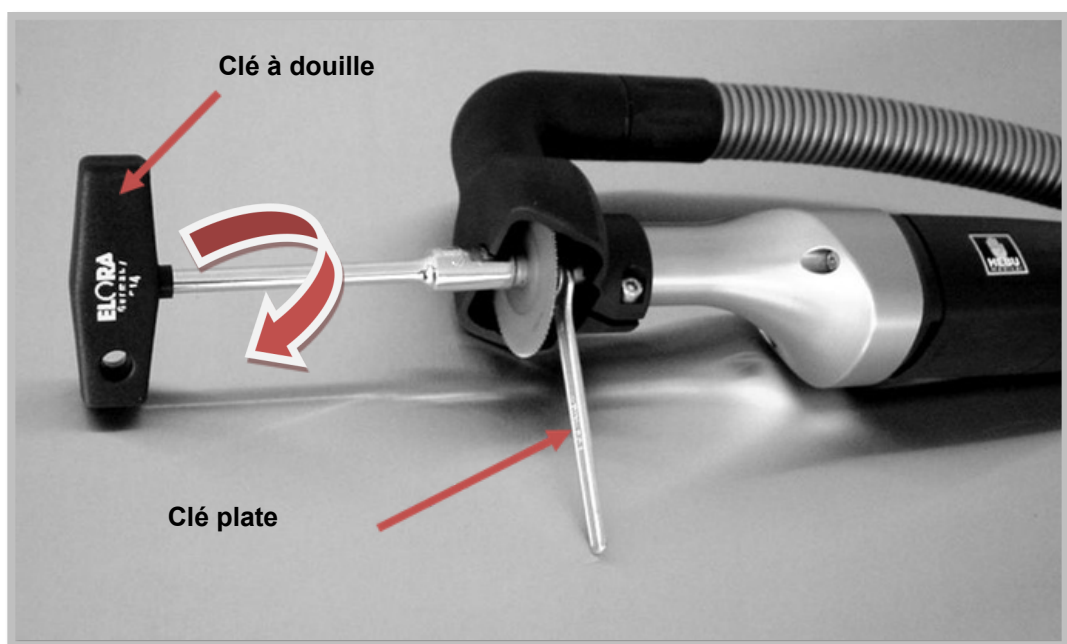




Utilisez toujours les deux touches pour changer la lame de scie ! Clé à douille pour serrer et clé à fourche pour bloquer la vis.

6 Nettoyage et entretien

	Débrancher la fiche secteur avant les travaux de nettoyage et d'entretien.
	Les réparations ne doivent être effectuées que par des centres de service après-vente agréés ou par des spécialistes en la matière qui connaissent toutes les consignes de sécurité en vigueur.
	Respecter les contrôles de sécurité conformément aux réglementations locales concernant les équipements commerciaux portables.
	La fermeture à baïonnette entre la cloche d'aspiration et le tuyau d'aspiration doit toujours être légèrement graissée avec de la graisse spéciale HEBU.
	La fermeture à baïonnette doit être nettoyée et graissée à intervalles réguliers.
	La bague d'étanchéité doit être contrôlée à intervalles réguliers pour détecter les fissures et les déformations. Ne jamais travailler sans joint d'étanchéité.

- Remplacer le filtre de protection du moteur tous les 3 mois (risque de perte d'aspiration ou d'endommagement de la turbine d'aspiration).
- Remplacez le filtre d'évacuation d'air une fois par an.
- En tant que produit de nettoyage, nous recommandons des produits dont le pH se situe entre 9 et 10, par ex. MediClean forte de Dr. Weigert.

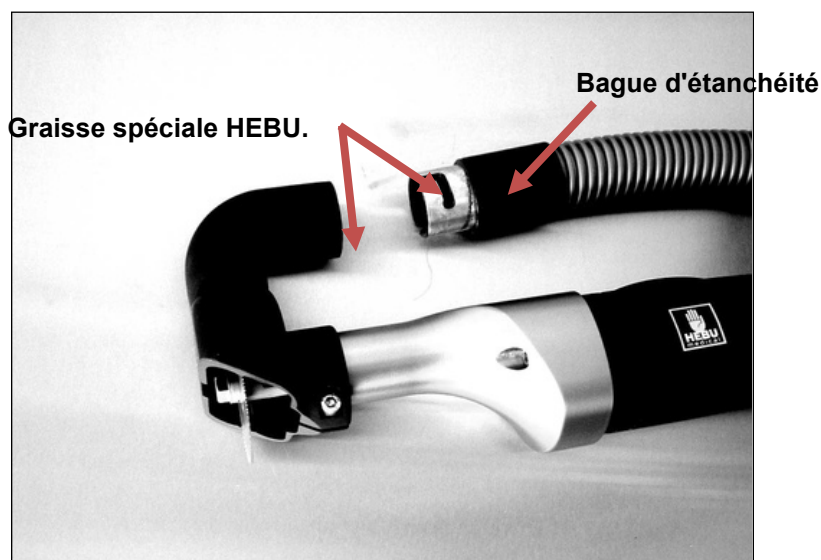

7 Accessoires / pièces de rechange

HB 8882-02	Tuyau flexible complet avec 2m
E 8888-01	Clé à douille avec poignée en T 11 mm
HB 8877	Tube avec graisse spéciale
E 8894-01	clé plate 11 mm
E 8894-02	Vis de rechange pour lame de scie
E 8894-03	Fixation pour vis

8 Accessoires / En option

HB 8883-03	Suspension avec poignée, réglable en hauteur
------------	--



HB 8883-05 Plateau magnétique pour lames de scie et outils

9 Garantie

Pour le dépoussiérage HEBU, nous offrons une garantie conformément aux dispositions légales et nationales spécifiques (preuve par facture ou bon de livraison). La période de garantie est d'au moins 18 mois. En cas de défaut de matériel ou de fabrication, nous réparons gratuitement l'appareil. Si vous tentez de réparer l'appareil vous-même, la garantie expire. Les dommages causés par une mauvaise manipulation, une surcharge ou une usure normale sont exclus de la garantie. Veuillez contacter notre service à la clientèle.

En cas de garantie et de réparation, veuillez joindre une copie de la facture ou du bon de livraison à l'appareil.

10 Directives relatives à la protection de l'environnement

A partir de la date de transposition de la directive européenne 2002/96/EU dans le droit national, respecter les règles suivantes:

■ Ne pas éliminer les appareils électriques et électroniques avec les ordures ménagères.

■ Le consommateur a pour obligation légale de retourner les appareils électriques et électroniques, à la fin de leur durée de vie, dans des points de collecte publics institués à cet effet ou à son point de vente.



Les détails de la procédure sont réglés par le droit national. Le symbole figurant sur le produit, le mode d'emploi ou l'emballage fait référence à ces dispositions. En assurant le recyclage, la récupération des matières ou d'autres formes de valorisation des appareils usagers, vous apportez une précieuse contribution à la protection de l'environnement.

Après la fin de la durée de vie de l'appareil, veuillez assurer un recyclage de l'emballage de l'appareil respectueux de l'environnement.



11 Adresse du service technique et du fabricant

Si vous avez besoin de ce mode d'emploi en version papier, veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous.

Le mode d'emploi papier sera mis à votre disposition dans les sept jours calendaires suivant la réception de la demande.

Alternativement, vous pouvez imprimer vous-même la mode d'emploi électronique.



HEBUmedical GmbH
Badstraße 8
78532 Tuttlingen / Germany
Tel: +49 7461 94 71 - 0
eMail: service@HEBUmedical.de
Web: www.HEBUmedical.de



A VOTRE SERVICE DEPUIS 1995

Route de Taillepied 44, 1095 Lutry

Tél : +41 21 903 57 67

www.healthsport.ch

Email: health.sport@bluewin.ch